

epi produce japan様 フォロー講習 (脱毛理論・機器について)

RENAISSANCE UOMO

メンズに特化し
効率的に脱毛できる
ヒゲ脱毛モードを
搭載した新世代^{*1}マシン

- 累計販売台数2,500台^{*2}以上
- 信頼の純国産製品
- 日本エステティック振興協議会適合機種
- 痛みを感じにくい冷却機能搭載



*1: 当社製品内比較 *2: 2020年6月現在

RENAISSANCE LUNA

女性から支持される
デリケートゾーン^{*1}に
着目した脱毛&
美肌モードを搭載

- 累計販売台数2,500台^{*2}以上
- 信頼の純国産製品
- 日本エステティック振興協議会適合機種
- 痛みを感じにくい冷却機能搭載



*1: 外生殖器、肛門部及び粘膜に直接触れるおそれのある
トリートメントには使用できません。

*2: 2020年6月現在

会社概要

会社名	株式会社コンフォートジャパン
本社所在地	〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 横浜三井ビルディング28F
設立	2008年5月
代表	手塚 均
資本金	3,000万円
従業員	119名

- 事業内容
- 化粧品の製造・販売および輸出入
 - 美容健康に関する器具・機材の製造・販売および輸出入
 - イタリア生まれのスパストアの展開とビジネスサポート
 - プロフェッショナルスタッフの斡旋と養成
- (スパに関する人材育成および店舗開発のコンサルタント業務)

事業所

<本社>

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島1-1-2 横浜三井ビルディング28F
TEL : 045-664-5511

<福岡支社>

〒810-0021 福岡市中央区今泉1-20-2 天神mentビル4F
TEL : 092-738-6611

<店舗>

ビューティアポセカリースパ by Davines

ダヴィネス 表参道ヒルズ店

ダヴィネス 渋谷スクランブルスクエア店

ダヴィネス 大丸札幌店

ダヴィネス ルミネ新宿店

ダヴィネス ルミネ池袋店

ダヴィネス ルミネ大宮店

ダヴィネス 大阪タカシマヤ店

ダヴィネス ジェイアール名古屋タカシマヤ店

ダヴィネス アミュプラザ博多店

ダヴィネス ニュウマン横浜店

伊勢丹新宿店本館地下2階=ビューティアポセカリー

伊勢丹新宿店メンズ館1階=メンズコスメティクス

取引先企業



商品の歴史（過去のリリース商品の紹介）



2006年



RenaissanceE（初期モデル）

2009年



RenaissanceZ

2011年



RenaissanceGT

2014年



アキュライズ

2015年



RenaissanceGT-R（高速モード搭載）

2016年



RenaissanceUOMO（メンズ用モード搭載）

2017年



RenaissanceLuna（デリケートゾーン用モード搭載）

業界を牽引し続ける当社だから出せる実績です。

2021年12月 累計出荷台数

3,300台突破！



◆会社・商品が認められ、百貨店内に直営店をオープン

コンプライアンスの厳しい百貨店に、会社・脱毛機の性能が認められ、新宿伊勢丹本館地下2Fに「ビューティアポセカリースパ by Davines」をオープン。ルネッサンスによる脱毛サービスの展開がスタートしています。





部品の製造・調達から組み立てまで、

全て日本国内の**純国産**



国産の定義は非常にあいまいです。

海外から機械を輸入し、国内でネジ1本変えれば「国産」と言ってしまう中、当社では、神奈川県で工場を設け、資材調達・製造・検品まで一括管理。美容機器に精通するエンジニアが日々開発を行っております。

メリット

- 純国産なので故障が少なく、メンテナンスコストが安い
- 機器の故障があっても迅速な対応が可能
- 機器が軽くて小さいので配送する際も宅配便で手軽に発送

◆美容ライト脱毛適合審査（日本エステティック振興協議会） 合格

◆エステティック機器認証（日本エステティック機構） 取得


様々な団体が発足し、認証制度がありますが、国の省庁が指導・関与している団体は「日本エステティック振興協議会」「日本エステティック機構」のみです。

◆厚生労働科学研究補助金


エステティック施術による身体への危害についての原因究明及び衛星管理に関する研究

◆形成外科・美容医療 医学博士による安全検査報告書 取得

毛乳頭および皮脂腺開口部を破壊しない美容機器であることの証明

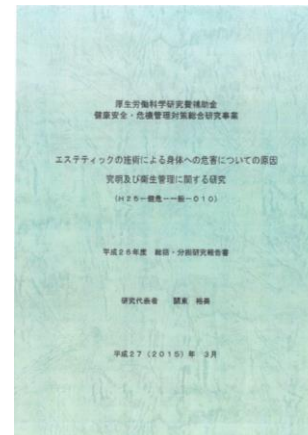

・ 認証制度について

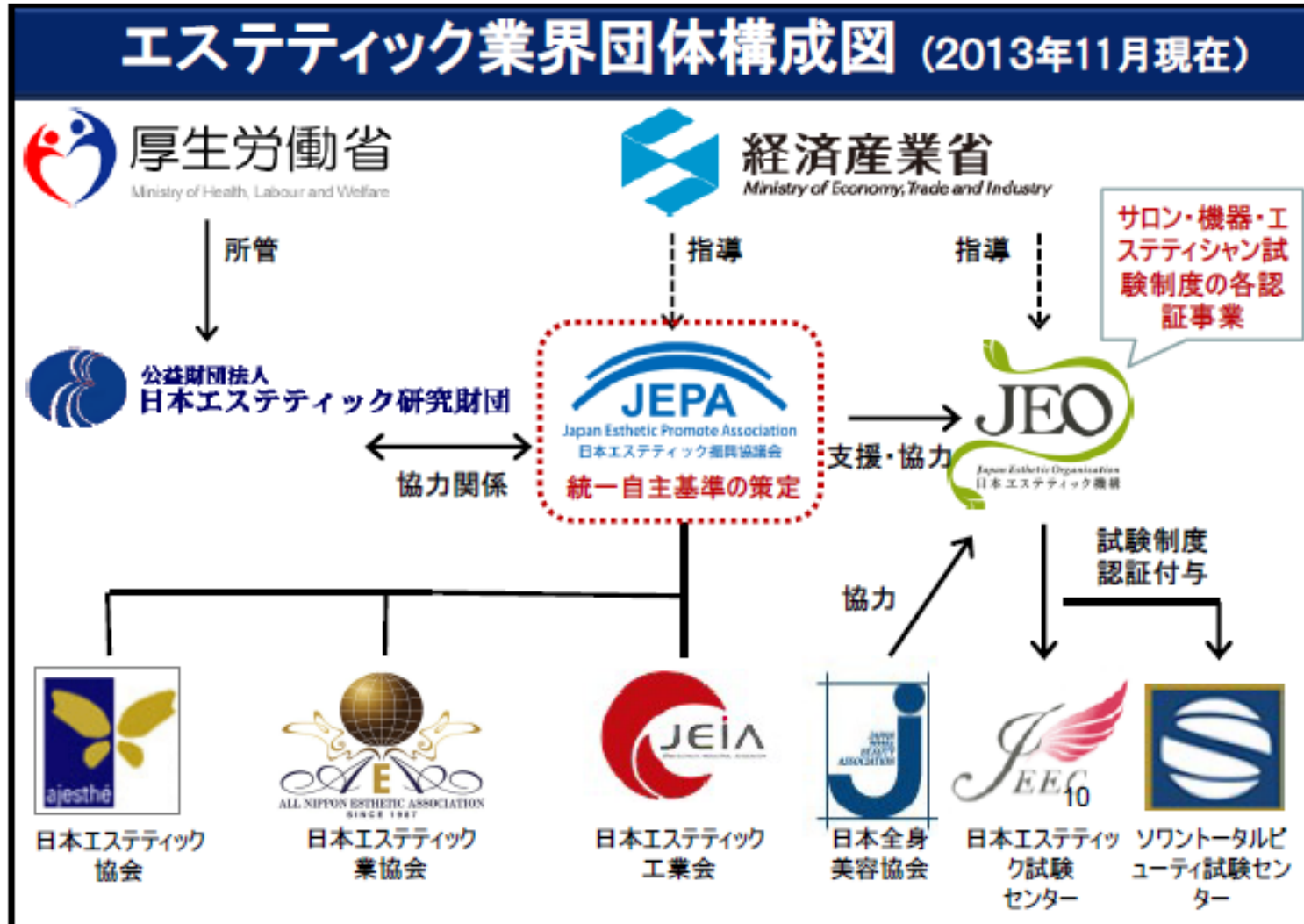

・ 認証基準

- 1、照射間隔が0.5秒以上
- 2、最大出力が15J/cm²未満

認証メーカーは8社のみ！！
(21年6月時点)

効果を出す 3 大要素

出力 (J、J/cm²)

- 単位の違いに注意！単位を揃えて比較すること！
- Jはその機械の最大出力（フルエンス） J/cm²は照射面 1 cm²あたりの出力

波長

- 脱毛に特化した波長は640nm
- ルネッサンスはフィルターを変えずに多彩なメニューができる波長に設定

パルス（幅、数）


- 光のあたる時間に関係し、安定して光を長く出せる方が安全で効果的
- ルネッサンスは脱毛で最大40msec、ボディモードで1,500msecのロングパルス
- 波形によっても痛みが変化するのできれいな波形であることが重要

**出力 (J/cm²) = 効果が高い
ではないので注意！！
3大要素のバランスが伴って初めて良い効果を残せる**

連射式との違い

連射式のメリットはスピード。
効果の高さを表す面積が連射式は小さいため、効果は損なわれる

1msec=1000分の1秒

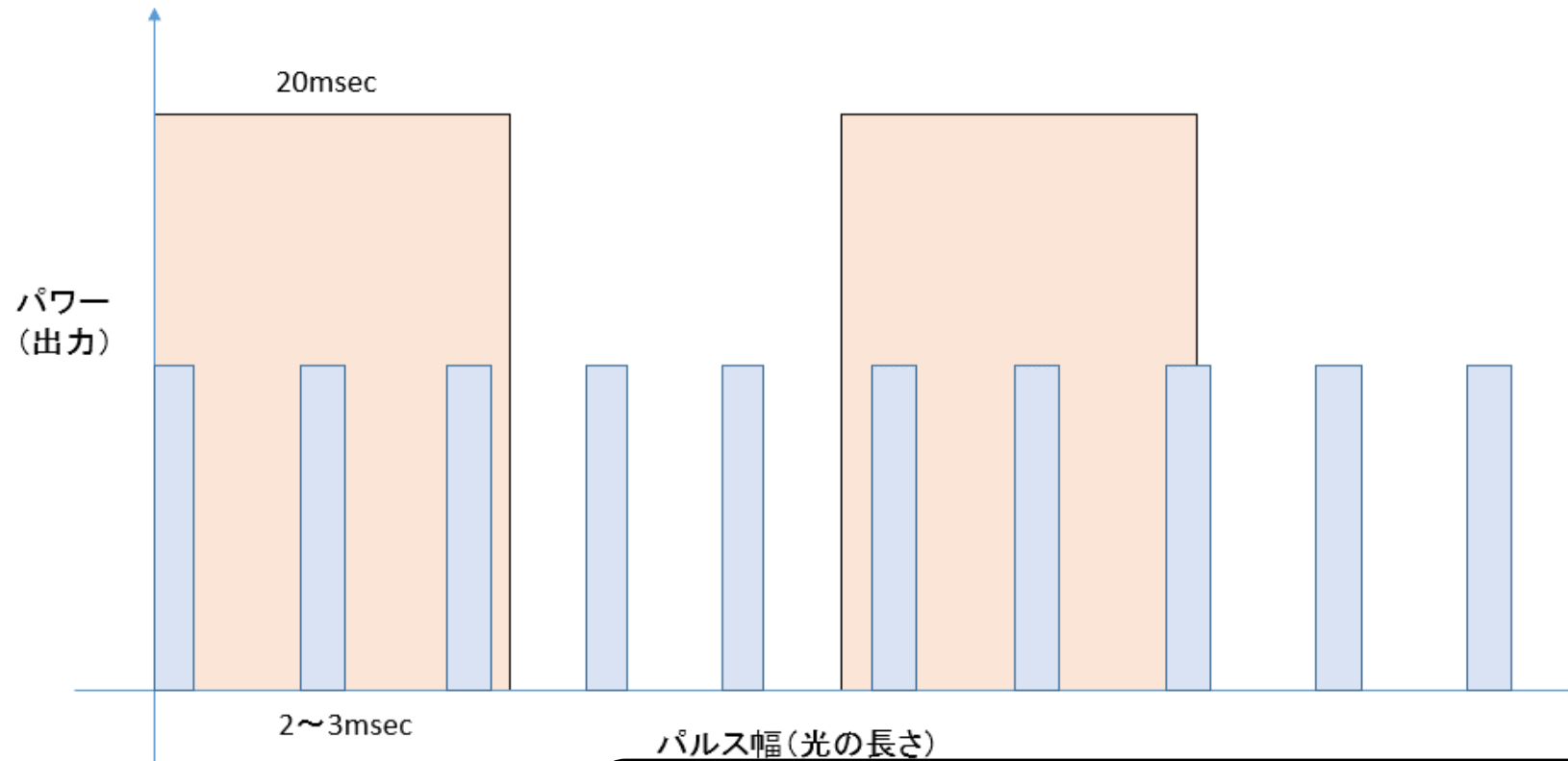

【導入事例】

SHR方式の脱毛機からの切替で顧客満足度UP!
理論に裏付けされた脱毛効果の高さが決め手



PL保険（生産物賠償責任保険）



商品の販売やサービスの提供等が原因で第三者に身体障害や財物損壊を与えてしまい、法律上の賠償責任を負担する場合に被る損害に備える保険です。

当社はPL保険に加入しているため、万が一機器トラブルによりサロンとお客様の間で問題が起きても保険の対応が可能です。しかし、当社がPL保険に加入してから現在までの約10年間、保険を活用するような事例は一切ありません。

安心の長期保証



ルネッサンスシリーズのUOMOとGT-R、LUNAは3年間保証、BAMBIとアキュライズは1年間保証。国産だからこそその長期保証を実現しています。

業務用脱毛機は決して安価ではありません。お客様に安全に安心して長くご利用いただけるよう、当社では保証期間を長めに設定しております。

すべてのお客様の、『万が一』への備えを万全に

脱毛の種類

ニードル脱毛（電気脱毛）

毛穴1つ1つに絶縁処理した特殊な細い針を刺し、針に微弱の電気を流して毛乳頭を破壊する脱毛方法です。かなりの痛みが伴い時間を要します。

ワックス脱毛

脱毛用に開発されたワックスを皮膚に塗り、これを引きはがすことによって、毛を毛根から取り除く脱毛方法です。皮膚に赤みが残ることもあります。

シェービング（毛剃り）

毛や毛根自体を破壊するのではなく、毛を剃るという除毛方法です。剃刀の扱いは理容師免許が必要です。

光脱毛

フラッシュ脱毛、IPL脱毛、プラズマ脱毛とも呼ばれ、脱毛サロンや総合エステなどで主流になっている脱毛方法です。レーザー脱毛と比べて光が弱く、痛みはほとんどありません。

医療レーザー脱毛

医療用の強力な脱毛レーザーを照射する脱毛方法です。レーザーの特性を利用し、レーザーが熱で毛を破壊します。さらにその熱によって毛根の周りの細胞が損傷し、毛の再生が抑制されます。

2-1.脱毛理論(IPL)

IPL（インテンス・パルス・ライト）脱毛は1998年頃に、最初に日本に紹介されたフラッシュ脱毛（光脱毛）です。

「インテンス・パルス・ライト」とは「強くて瞬間的な光」という意味で、

発光の原理はカメラのストロボにも利用されているキセノンランプ等による放電発光を利用したものです。キセノンランプの光は、強力な白色光のため、様々な波長の光を含んでいます。


様々な波長の光の中から、お肌にやけどを負わせる短い波長をカットして、メラニン色素に効率良く作用する波長の光だけをフィルタで透過させて、毛根に照射します。医療レーザーよりも波長が長いので、効率良くお肌の奥まで届きます。

熱エネルギーが毛を作っている箇所のを弱め、毛の再生を遅らせていきます。

IPLは、元々アザやシミなどの光治療を目的として開発されたものですが、これを脱毛に利用したのがIPL脱毛です。

※大手採用例：キレイモ、C3

IPL方式

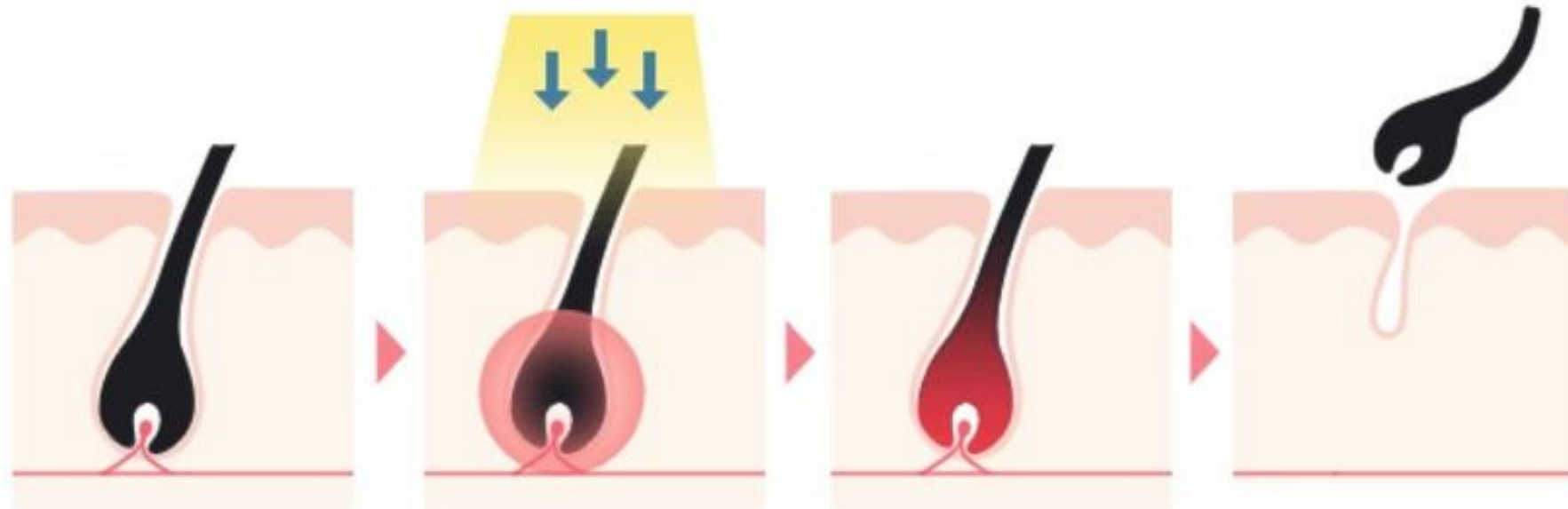

光を照射
メラニン色素
が反応する

毛根が熱で
ダメージ

毛が抜け落ちる


2-2.脱毛理論 (SSC脱毛)

SSC脱毛とはスムーズスキンコントロール(Smooth Skin Control)の略で、ジェルを塗って光を当てて脱毛を行う方法です。

使われるジェルの名を「ビーンズジェル」、照射する光を「クリプトンライト」と言います。


ビーンズジェルには「トレジャービーンズ」という成分が配合されており、光を照射するとトレジャービーンズから、制毛効果のフィリニープが出てきます。

そのフィリニープの効果で、2～3週間後に毛が抜け落ちるという仕組み。

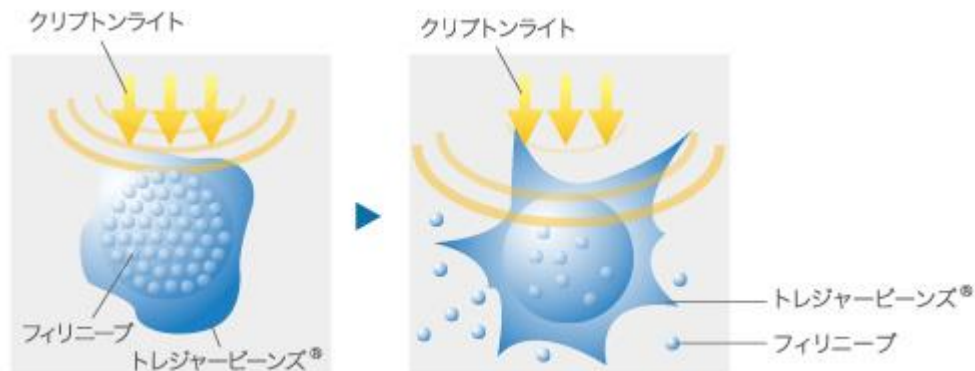


採用大手：ミュゼ・脱毛ラボ

Step 1

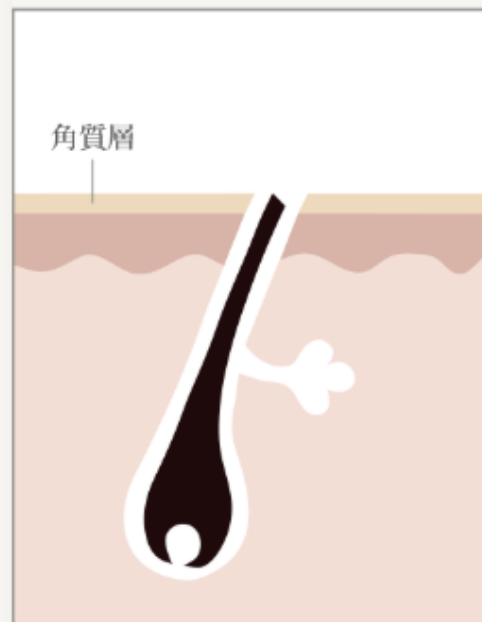


トリートメント時は肌表面の毛をシェービングしておきます。

Step 2

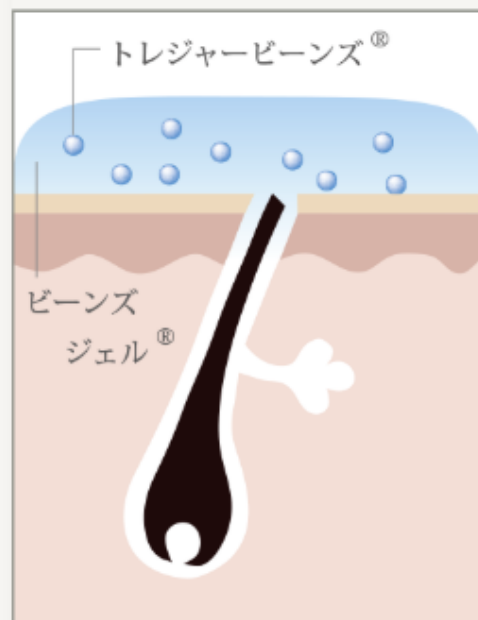

施術部位へトレジャービーンズ®の配合されたビーンズジェル®を塗布。

Step 3

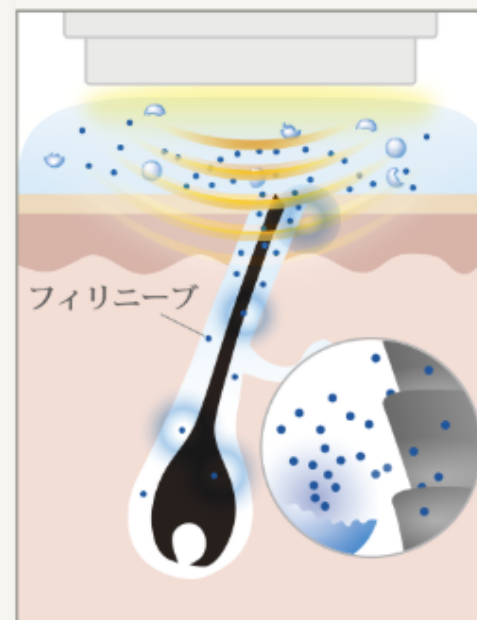

クリプトンライトを照射。有効成分が溶け出し、照射の温熱効果によって開かれた毛穴に浸透しオフヘア（制毛）を促します。

2-4.脱毛理論(SHR理論)


SHR（スーパー・ヘア・リムーバル）方式は、メラニン色素ではなく毛を作る組織を含めた毛包全体に熱を連続で与えて蓄熱し、毛の再生しにくくする脱毛方式です。肌にダメージを与えず、痛みの心配がなく、かつ毛周期や肌の色、毛の色に影響されず施術できるので、導入する脱毛サロンも増加中です。エステサロンで使用されているRF（ラジオ波）もついているので、脱毛と同時に美肌も期待できます。

THR（サーモヒートリムーバー）方式

FHR（フレキシブルヘアリムーバル）方式

OPT（オプティマルパルステクノロジー）方式

採用大手：ラココ・ストラッシュ

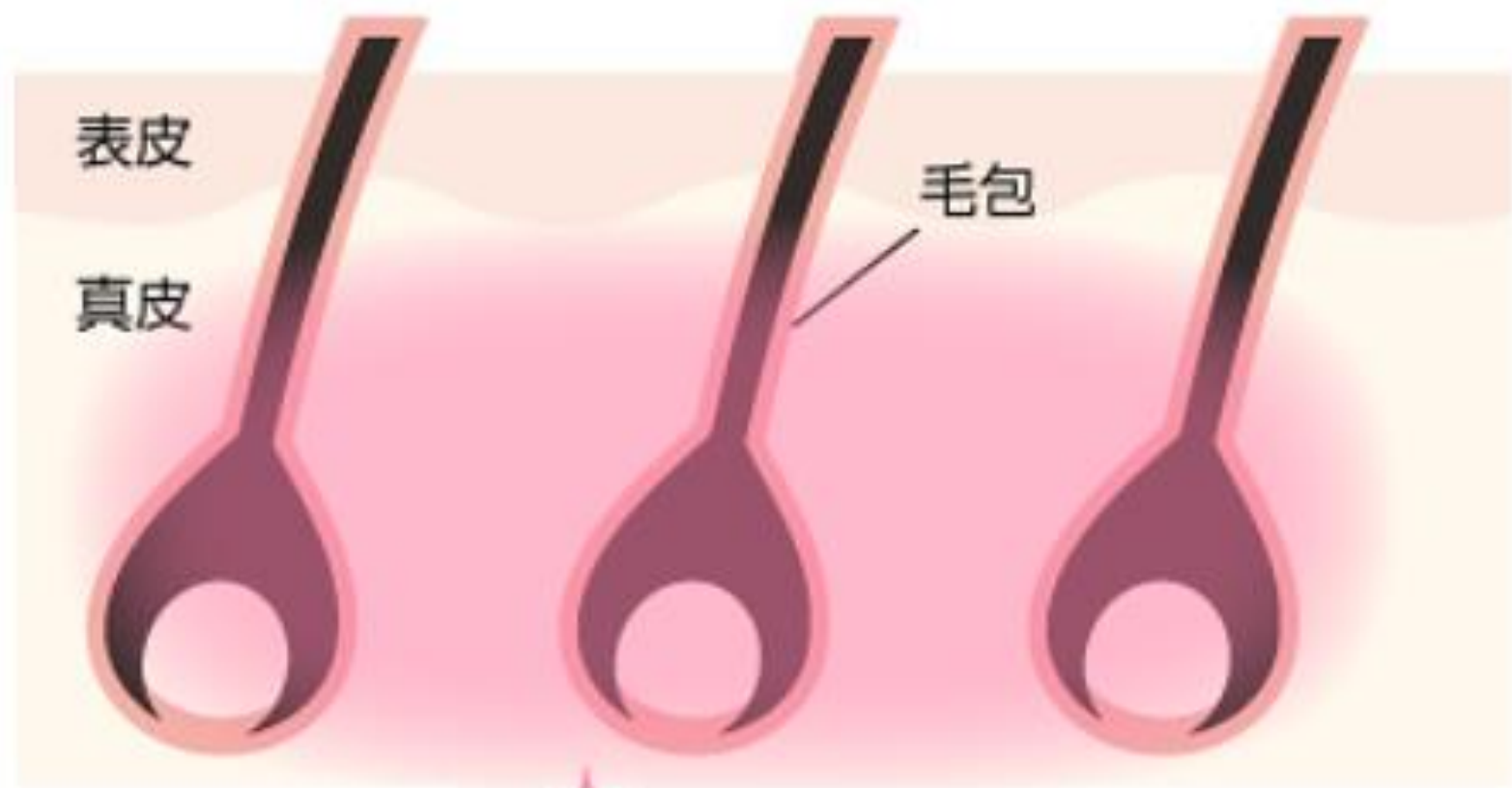

SHR 脱毛方式

脱毛理論の矛盾点

日本の脱毛機メーカーのうち、
1社を除いてすべてランプには「キセノン管」を用いている。

キセノン管は太陽光に近い光を出せる。

脱毛機は、その光のうち、有害な紫外線領域の光をカットするフィルターを通して発光している。

→出ている光は「どの理論でも同じもの」

→黒に反応しない根拠は??


脱毛ジェルの有無について

ジェル有のメリット

- 1,お肌の保護
- 2, 施術効果の向上
- 3, 潤滑を良くする

ジェル無しのメリット

- 1,ふき取る手間がない
- 2,コストがかからない
- 3, 洗濯の手間がなくなる

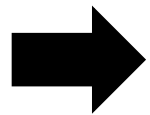

どちらの方がエンドユーザー目線なのか??



・導入サロン紹介例

ルネッサンスLUNA

近年関心が高まっているデリケートゾーンの処理。美意識が高く、流行の最先端にいる海外セレブにとっては、もはや当然のケアとなりました。

見えないところまできちんとケアすることで、自信に満ち溢れた、真に美しい女性の姿を叶えます。



・導入サロン紹介例

4. **最高級** マシーンなので 痛みが少なく効果バツグン

100万前後の安い機械を使うメンズ脱毛サロンが多い中、BAGUSでは痛みの少ない国内最高品質の脱毛機器を採用しています。

ヘアカットの場合はスタイリストの技量を顧客から求められますが、脱毛の効果は機械が全てと言っても過言ではありません。

ヒゲの脱毛モードを搭載したマシーンを是非ともお試しく下さい。



- ・ 導入サロン紹介例



又、男性のヒゲは濃くて太いことから、無駄なく効率的に除毛ができて男性用に開発された最新機種であることが必須です。

※ 男性の毛質に合わせた「ヒゲ脱毛モード」を搭載

このような背景を捉え、現在日本国内外でもNo.1と言える「ルネッサンス UOMO」を採用しています。

- ご質問

Q機械の金額相場について

→100万～500万とピンキリです。

250万を切るメーカーはほぼ中国製です。

その他、出力や耐久性のスペック、メンテナンス対応などの会社体制が各社異なります。

Q.ショット寿命を迎えた場合、上回って使用した場合

→寿命を迎えた場合光源（ハンドピース）を交換頂く必要がございます。

費用は29万円（税別）です。

ショット寿命を超えての使用ができないようリミッターをかけております。

その為、使用しようとしても光は出ない設計になっております。

Q,家庭用脱毛機との違い

→出力と冷却が違います。

最大出力で比べると4倍程高い出力が出せます。

また、照射面の冷却が強いので痛みが軽減出来ております。